


Como tirar medidas?

MEDIDAS

Tirar sistematicamente as medidas a 100% dos pacientes, mesmo sendo uma renovação.

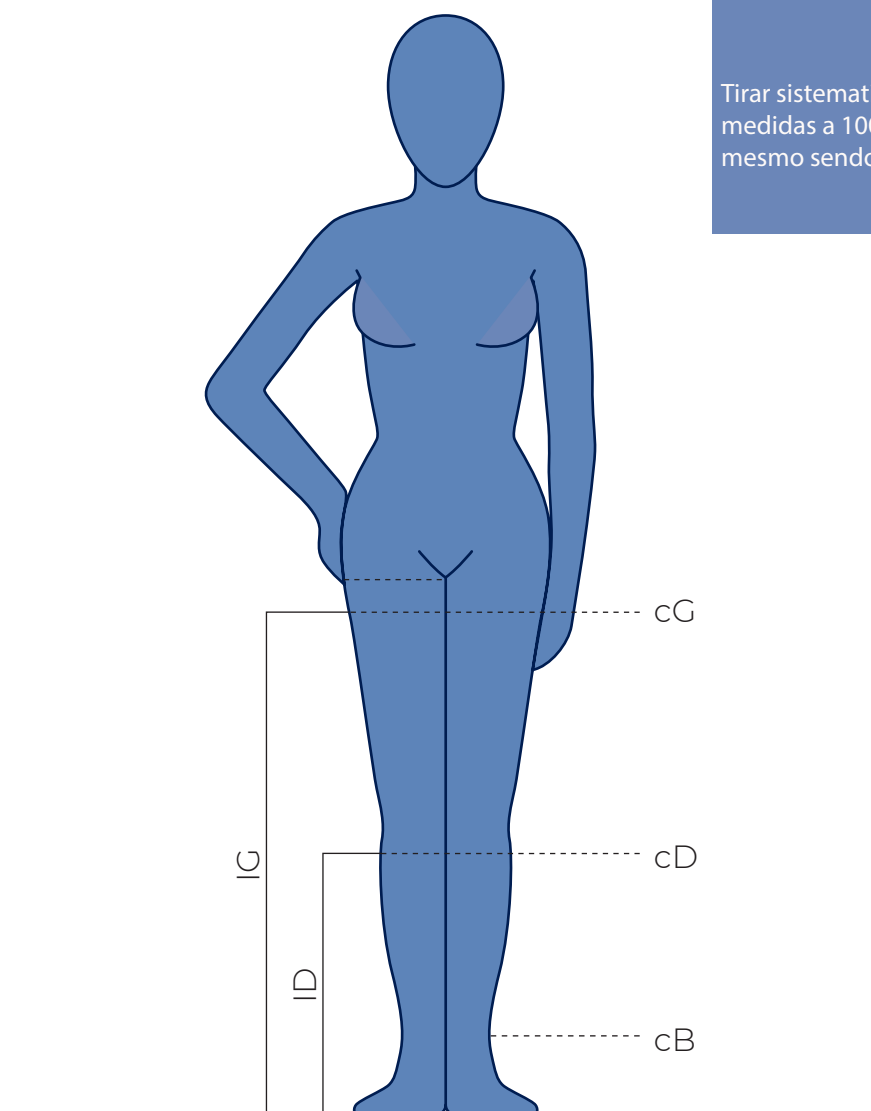

Medida Suíça:

Thermoregulating, Classical, Traditional, etc.

Circunferência da perna

Direita/ Esquerda

cG /

medida da coxa - 5cm abaixo da virilha (é a 2ª medida para meias até à raiz da coxa ou collant)

cD /

medida da barriga da perna - 2 dedos abaixo do joelho (é a 2ª medida para meias até ao joelho)

cB /

medida do tornozelo - acima do maléolo na zona + fina (para todas as meias)

É a medida + importante. Deve ser tirada de manhã, por um profissional rigoroso, para garantir a maior eficácia.

Altura da perna

Direita/ Esquerda

IG /

do chão até 5cm abaixo da virilha (para meias até à raiz da coxa e para collant)

ID /

do chão até 2 dedos abaixo do joelho (para meias até ao joelho)

A altura deve ser medida com o utente descalço.



Circunferência - medida que vai indicar o tamanho (xxs, xs, s, m, l, xl, xxl) conforme os modeloss.
Altura - medida que vai indicar a altura da meia (curto, normal, longo) conforme os modelos