



WINGS
FOR YOUR HEALTH


MOBIDERM autofit



TABELAS DE
MEDIDAS E GUIA
DE UTILIZADOR

MOBIDERM autofit

Membro superior: manga

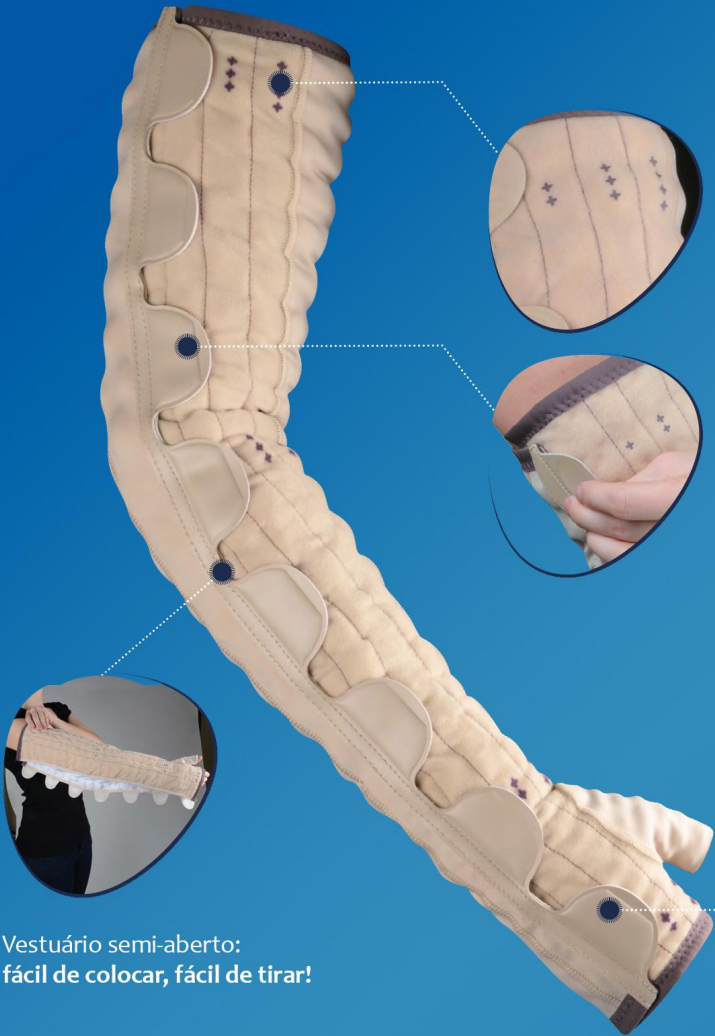

Vestuário semi-aberto:
fácil de colocar, fácil de tirar!

Vários pontos de ajuste:
adaptação à morfologia individual de cada paciente.

Marcas de ajuste:
aplicação precisa e reproduzível, controle da variação do volume do edema.

Fixadores de velcro:
configuração imediata e alto desempenho

Manga com luva retrátil acoplada: limita o risco de migração do edema; a mão pode ser libertada para tarefas diárias.



TABELA DE MEDIDAS

A manga MOBIDERM autofit tem 6 tamanhos, de acordo com as circunferências do braço em diferentes pontos; cada tamanho é proposto em dois comprimentos, normal ou longo, de acordo com o comprimento do braço tratado. 2 versões estão disponíveis, direita ou esquerda

A tabela de medidas é indicativa. Medidas individuais podem ser necessárias para encontrar o tamanho ideal

	CIRCUNFER- ÊNCIA DA AXILA (E)	CIRCUNFERÊNCIA ANTEBRAÇO (no ponto mais largo) (D)	CIRCUNFER- ÊNCIA DO PULSO (C)	CIRCUNFER- ÊNCIA DA MÃO (B)
T1	25 - 32	22 - 28	15 - 19	17 - 21
T2	29 - 36	24 - 30	16 - 20	17 - 21
T3	33 - 40	26 - 32	17 - 21	18 - 22
T4	37 - 44	28 - 34	17 - 21	18 - 22
T5	41 - 48	30 - 36	18 - 22	19 - 23
T6	45 - 52	31 - 37	19 - 23	20 - 24

Normal: / 40 - 45 cm Long: / 45 - 50 cm



COMO VESTIR?

- 1
- Abra os fixadores da manga e deslize-a no braço, mantendo-a em linha reta (sem girar em volta do membro).



- 2
- Posicione gradualmente os fixadores localizados no pulso, cotovelo, axila e mão, nas áreas (+ / ++ / +++ / ++++), de acordo com as instruções do seu médico. Faça isso passo a passo até chegar ao ajuste recomendado. Alinhe os fixadores intermédios no eixo dos já colocados.



- 3
- Massage a manga para uniformizar a distribuição dos cubos ao longo do membro.



COMO AJUSTAR A MANGA

Definir o local do fixador depende:

- do tamanho da manga entregue
- das medidas individuais do paciente



Exemplo: um paciente com tamanho 2 e com uma circunferência da mão de 18 cm deve ajustar o fixador na área ++ ao nível da mão.

NÍVEL DA MÃO (B)						
Circunferência (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
17	+++	+++				
18	++	++	+++	+++		
19			++	++	+++	
20	+	+			++	+++
21			+	+		++
22					+	
23						+
24						

NÍVEL DO PULSO (C)						
Circunferência (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
15	+++					
16	++	+++				
17		++	+++	+++		
18	+		++	++	+++	
19		+			++	+++
20			+	+		++
21					+	
22						+
23						

NÍVEL DO ANTEBRAÇO (3 cm abaixo do cotovelo) (D)						
Circunferência (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
22	++++					
23	+++					
24		++++				
25	++	+++				
26		+++	++++			
27	+	++	+++			
28		+	++	++++		
29			++	+++		
30					++++	
31			+	++	+++	++++
32				+	++	+++
33						++
34					+	+
35						+
36						
37						

NÍVEL DA AXILA (E)						
Circunferência (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	T6
25	+++					
26						
27						
28	++					
29		+++				
30		++				
31	+					
32						
33			+++			
34			++			
35		+				
36						
37				+++		
38				++		
39			+			
40						
41					+++	
42				+		
43					++	
44						+++
45						
46					+	++
47						+
48						
49						
50						
51						+
52						

MOBIDERM autofit

Membro inferior: meia até ao joelho ou meia até à raiz da coxa



Vestuário semi aberto:
fácil de colocar, fácil de tirar

Vários pontos de ajuste:
adaptação à morfologia individual
de cada paciente

Marcas de ajuste:
aplicação precisa e reproduzível, controle
da variação do volume do edema

Fixadores de velcro:
configuração imediata e alto
desempenho

Duplo desempenho:
grande adaptação e variabilidade
permite o uso na direita e na esquerda


Sola antiderrapante:
limita o deslizamento ao andar

TABELA DE MEDIDAS

MOBIDERM autofit para membro inferior é oferecido em 2 modelos, meia até ao joelho ou meia até à raiz da coxa. Cada modelo tem 4 tamanhos; cada tamanho existe em 4 comprimentos diferentes: Curto, Normal, Longo, X Longo

	MOBIDERM autofit meia		
	Nível do tornozelo (B)	Nível do gêmeo (C)	Nível do joelho (D)
T1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
T2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
T3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
T4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
Curto: ℓ(D) 38-40 cm Normal: ℓ(D) 40-42cm			
Longo: ℓ(D) 42-44 cm X Longo: ℓ(D)44-46cm			

	MOBIDERM autofit meia até à raiz da coxa		
	Nível do tornozelo (B)	Nível do gêmeo (C)	Nível da coxa (G)
T1	16 - 24	24 - 35	46 - 57
T2	20 - 28	32 - 43	53 - 65
T3	24 - 32	40 - 51	61 - 72
T4	28 - 36	48 - 59	68 - 80
Curto: ℓ(G) 67-72 cm Normal: ℓ(G) 72-77cm			
Longo:ℓ(G) 77-82 cm X Longo: ℓ(G) 82-87cm			

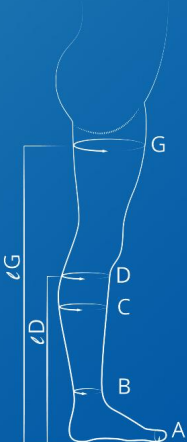


A tabela de medidas é indicativa. Medidas individuais podem ser necessárias para encontrar o tamanho ideal.

COMO VESTIR

- 1 Abra a meia e coloque a peça na perna, mantendo-a reta.



- 2 Posicione gradualmente as guias de velcro nas áreas (+ / ++ / +++ / ++++), de acordo com as instruções do seu médico. Faça isso passo a passo até chegar ao ajuste recomendado. Alinhe os fixadores intermédios no eixo dos já colocados.

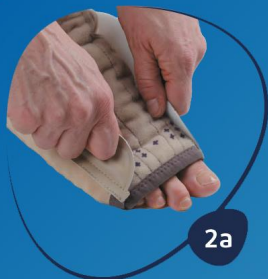

- 3 Massage a perna para distribuir uniformemente os blocos.



COMO AJUSTAR A MEIA?

Definir o local dos fixadores depende:

- do tamanho da peça entregue
- das medidas individuais do paciente

Exemplo: um paciente com tamanho 2 e com uma circunferência do pé de 22 cm deve ajustar o fixador na área ++ no nível do pé.



NÍVEL DO PÉ (A)				
Circunferência	T 1	T 2	T 3	T 4
18 - 19	+			
20 - 21	++	+		
22 - 23	+++	++	+	
24 - 25		+++	++	+
26 - 27			+++	++
28 - 29				+++

NÍVEL DO TORNOZELO (B)				
Circunferência	T 1	T 2	T 3	T 4
16				
17	+			
18				
19				
20	+			
21		+		
22				
23	+++			
24		++		
25			+	
26				
27		+++		
28			++	
29				+
30				
31			+++	
32				++
33				
34				
35				+++
36				

NÍVEL DO GÊMEO (C)				
Circunferência	T 1	T 2	T 3	T 4
24 - 27	+			
28 - 31	++			
32 - 35	+++	+		
36 - 39		++		
40 - 43		+++	+	
44 - 47			++	
48 - 51			+++	+
52 - 55				++
56 - 59				+++

NÍVEL DA COXA (G)						
Circunferência	T 1	Circunferência	T 2	T 3	Circunferência	T 4
39 - 43	+					
43 - 47	++					
47 - 51	+++	46 - 50	+			
		50 - 54	++			
		54 - 58	+++	+		
		58 - 62		++		
		62 - 66		+++	61 - 65	+
					65 - 69	++
					69 - 73	+++





WINGS
FOR YOUR HEALTH

CUIDADOS A TER

Fechar os fechos de velcro antes de lavar



Duas opções de lavagem possíveis:

- **Lavar à mão:**
Mergulhe o dispositivo em água fria e sabão, esfregue com uma esponja limpa e esprema a água pressionando.
- **Lavar na máquina:**
Use o ciclo de lã, com temperatura fria, e use uma rede de lavandaria. Não torcer. Esprema a água à mão pressionando.

Em ambos os casos, deixe secar à temperatura ambiente longe de qualquer fonte direta de calor.

Quando não usada,
a manga/ perna
deve ser mantida
plana, com os fechos
de velcro fechados.
Se precisar ser
dobrado, posicione os
fixadores para fora.



THUASNE 120, rue Marius AUFAN - CS 10032 - 92309 Levallois Perret
e-mail: sales.export@thuasne.fr
www.thuasne.com

www.medivaris.pt